

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
BLOOD SAMPLING CHAIR

Deneo®.Lab



NOUVEAUX
MODÈLES / MODELS
NEW

FAUTEUILS DE PRELEVEMENTS




Deneo®. Lab

professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

DENE0® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENE0® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.

CONFORT COMFORT

- Rotation 360° (sur certains modèles)
- Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- Sellerie **Bodyshape®** : positionnement naturel
- 360° rotation (on specific models only)
- Reduced volume, optimized space
- **Bodyshape®** upholstery: natural body position

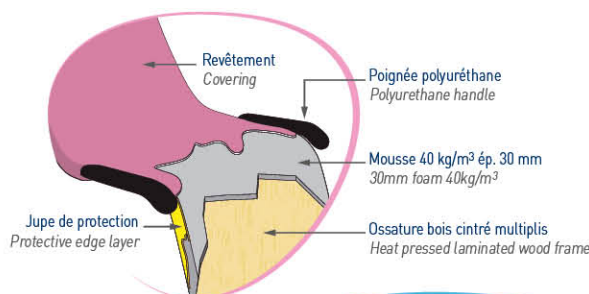

HYGIÈNE HYGIENE

- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Nettoyage facilité
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
- Easy to clean
- Seamless upholstery
- Removable handles



SÉCURITÉ / SAFETY

- Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées → longévité
- Base circulaire : stabilité du fauteuil
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Capacité patient : 200 kg
- Easy, effortless and rapid emergency position
- Armrests on the backrest and integrated handles → long service life
- Circular base: chair stability
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- Maximum capacity: 200 kg

Design : Alain Duteil

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- Concept **Sit'n Go®** : position d'accueil à 50 cm du sol (selon modèles)
- Angle de l'appui-jambes modifié pour un accès facilité
- **Sit'n Go®** concept: welcome position at 50 cm from the ground (specific models)
- New legrest angle for easier access

Concept **Sit'n Go®** (selon modèles) / **Sit'n Go®** concept (specific models)



Le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales et le fauteuil se met en position d'accueil.
The patient positions his hands on the lateral grips and the seat lowers to facilitate the entry.



Le fauteuil reprend sa position sans aucune intervention du praticien.
When the patient leans back, the chair automatically swings back to a comfortable position.



La position d'urgence peut être obtenue à n'importe quel moment tout en maintenant la position des bras par rapport au corps.
Effortless, the emergency position is obtained at any time, without effort for the practitioner.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (assise 50 cm)
et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)
Structure et base circulaire en acier finition époxy gris nuage
(sauf réf. 80010-02R et 80015-02R)
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise
Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1
mousse épaisseur 30 mm, densité 40 kg/m³
2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules
avec mousse et revêtement M1 thermoformé sans couture
Poids maximum du patient autorisé 200 kg
(testé en statique à 500 kg)

STANDARD FEATURES

Fixed height (seat at 50 cm)
and hydraulic variable seating height from 51 to 71 cm
Light grey epoxy covered steel for the base and structure
(except ref. 80010-02R and 80015-02R)
Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat
One-piece structure seamless upholstery
foam thickness 30 mm, density 40 kg/m³
Two removable formed armrests. Swivel adjusting system.
Seamless heat formed M1 covering
200 kg patient weight capacity
(tested at a static weight of 500 kg)




NOUVEAUX
MODÈLES / MODELS
NEW

Modèles Models	Hauteur fixe base circulaire Fixed height circular base	Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm Fixed height base 4 castors ø 50 mm	Hauteur variable hydraulique Hydraulic variable height	Avec rotation With rotation	Concept Sit'n Glee
80000-02R	●			●	●
80010-02R		●		●	●
80070-02R			●	●	●
80005-02F	●				
80005-02R	●			●	
80015-02R		●		●	
80075-02R			●	●	

Tous ces modèles bénéficient du nouvel angle de l'appui-jambes pour faciliter l'accès.
All these models feature the new legrest angle for easier access.

Optimiser l'espace Optimize space

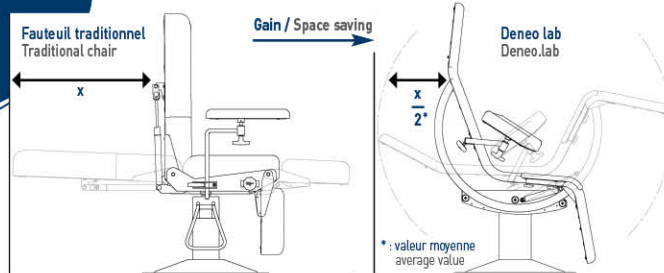

La rotation 360° permet
au praticien de prélever
sur l'un ou l'autre bras
sans se déplacer.

The 360° rotation
allows easy
transition to the
opposite
side of the
patient without
moving.



Accessoires Accessories

167-10 Porte-rouleau (long. maxi 50 cm, ø 20 cm) Paper roll holder (length max 50 cm, ø 20 cm)	964 Plateau seul Stainless steel pan (240 x 180 x 30 mm)	80901-01 Plateau avec bras rigide pivotant (droite / gauche) S/S pan with swivelling arm (right / left)	80902-01 Plateau avec bras flexible pivotant (droite / gauche) S/S pan with flexible swivelling arm (right / left)	80905-01 Protection plastique (côté jambes) Plastic covering (leg section)
80920-01 Support pour étaux (côté jambes ou tête) Clamp support (leg or head side)	80921-01 Étau pour accessoires ø 16 mm Clamp for accessories ø 16 mm	Lightec +80921-01 Se référer à la documentation Refer to the literature	2985-01 + 80921-01 Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets Auto-locking 2 hook IV pole	80523-01 Tabouret Stool hauteur/height mini : 47 cm / maxi : 66 cm
80906-01 Protection plastique (côté tête) Plastic covering (head section)				80542-01 Pouffe Pouffe hauteur/height 52 cm

